

[使用方法について]

各部の名称

※製品は曲げた状態で販売いたします。

空間部



はし
把持部

1. 挿入法

① リングを装着対象の指に向かって矢印の方向に挿入します。



② 指の第一関節が、空間部の真ん中になるように装着します。



③ リングの把持部を閉めて、指の形に合うように調整します。



※腫れがひどく、「挿入法」での装着が難しい場合はこちらの方法で装着してください。

2. 圧着法

① リングの把持部を外側に開きます。



② リングを広げた状態で、指の第一関節が空間部の真ん中になるように上から圧着します。



③ リングの把持部を閉めて、指の形に合うように調整します。

