

**器 01 手術台及び治療台**  
**一般医療機器 汎用診断・処置用テーブル 13958009 (JMDNコード)**

**【 スズ開創手形板 】**

**【形状、構造及び原理等】**

**1. 材料**

錫(すず)

**2. 外観形状・構造**



※表裏の両面をご使用いただけます。

**3. 原理**


本品に手術又は処置が必要な部位を載せ、固定や分離することにより、必要な部位の手術を行いやすくする。

**【使用目的又は効果】**

手術又は処置が必要な部位の固定用テーブルとして用いる。  
 開創部は、組織を分離するために用いる。

**【使用方法等】**

**各部の名称**

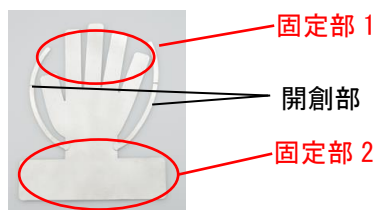

**使用方法**

1. 本品は未滅菌品のため、使用前に必ず洗浄、滅菌を行ってください。  
 (保守・点検に係る事項を参照ください)
2. 本品に手術又は処置が必要な手部位を載せ、固定部 1、2 を曲げて、手部位を固定してください。
3. 開創部は、組織の分離が必要な際に、曲げてご使用ください。

**【使用上の注意】**

- ・本品は未滅菌品のため、使用前に必ず洗浄、滅菌を行ってください。
- ・本品が破損した場合、ただちに使用を中止してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・高温・高湿を避け、清潔な場所に保管してください。
- ・洗浄をした後など、腐食を防ぐために直ちに乾燥させてください。

**【保守・点検に係る事項】**

- ・本品は未滅菌品のため、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件(例:日本薬局方 115-118℃:30分間、121-124℃:15分間、126-129℃:10分間)、又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件で滅菌してください。
- ・本品を化学薬品に曝さないでください。
- ・使用前に、汚れ、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検してください。
- ・使用後は速やかに洗浄を行ってください。
- ・洗浄に使用する洗剤は、必ず中性洗剤を使用してください。アルカリ性や酸性の洗剤は使用しないでください。また、医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないでください。
- ・洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。
- ・洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないでください。
- ・洗浄後に汚れが残った状態での滅菌はしないでください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者・製造業者

名称:株式会社 能作

住所:富山県高岡市オフィスパーク8-1

電話番号:0766-63-5080