


医05 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000（JMDNコード）

【 ブシャール リング 】

【禁忌・禁止】

- ・骨折や腱の断裂などのケガに対して使用しないこと。また、指の第二関節(PIP関節)の固定以外の用途で使用しないこと。[症状がひどくなったり、ケガをしたりする可能性があるため。]
- ・本品を装着したままで磁気共鳴診断装置(MRI装置)を使用しないこと。[発熱しやけどをするおそれがあるため。]

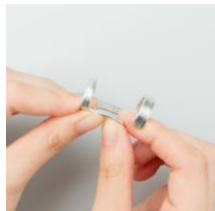


①板部を曲げ、固定角度を調整します。

【形状、構造及び原理等】

外観形状・構造



| サイズ | 幅 | 高さ | 厚み |
|-----|---------|------|-------|
| SS | 76mm | 23mm | 1.4mm |
| S | 88.5mm | 31mm | 1.7mm |
| M | 102mm | 34mm | |
| L | 116.5mm | 37mm | |

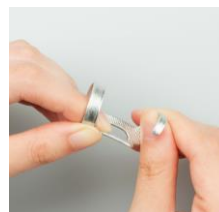

②指を挿入するため、上下の固定部を少し開きます。

【使用目的又は効果】


損傷した指の第二関節の固定。



③固定部(遠位側)を上にして、リングを装着対象の指に向かって挿入します

【使用方法等】

各部の名称

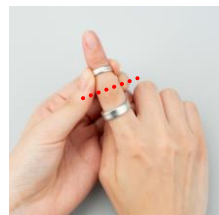


④指の第二関節がリングの中間になるように装着します。

装着イメージ

手の甲側



手の平側

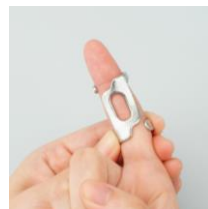

⑤リングの固定部を閉じて、指の形に合うように調整します。必要に応じて板部の角度を再調整します。

【使用上の注意】

- ・本品を装着しながら手を使用する作業等をした場合、リングが緩くなり外れやすくなる場合があります。できるだけ手を安静にできるときに使用してください。
- ・本品は関節をある程度制動するものであり、関節を完全に固定したり、変形した関節を矯正したりすることはできません。
- ・装着により、少しずつ機能が劣化します。緩くなったり、破損がみられたりする場合は、新しいリングを購入してください。
- ・なるべく長期間ご使用いただくために、リングの開閉は最小限にしてください。
- ・リングの閉めは、心地よく関節が安定する程度で十分です。過度な閉めは、指の神経や血管に影響を及ぼす可能性がありますので、行わないでください。
- ・装着により、指にしびれが出たり、爪が白くなったりする場合は、リングを緩めるか、使用を中止してください。
- ・亀裂や破損の原因となるため、過度な折り曲げはお止めください。
- ・さびや破損のないことを確認してからお使いください。
- ・リングが破損した場合、ケガをするおそれがありますので、ただちに使用を中止してください。
- ・肌の弱い方は金属アレルギーに十分ご注意ください。使用中に発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状が現れた場合には、ただちに使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・使用頻度や使用方法により異なりますが、1~3ヶ月を目途に交換してください。
- ・錫の特性により、氷点下(0℃以下)で変形するおそれがあります。氷点下(0℃以下)での保管は避けてください。
- ・熱伝導率が高いため、環境に応じて、本品も熱くなったり冷たくなったりします。火傷や凍傷には十分にご注意ください。特に、火気の近くでの使用・保管や、サウナでの使用は避けてください。
- ・高温、多湿を避けて保管してください。上記の方法で保管した場合でも、黄変する場合があります。

【保守・点検に係る事項】

- ・柔らかいスポンジを用いて、台所用中性洗剤で洗っていただくことができます。
- ・光沢が鈍くなってきたときは、重曹をペースト状にして磨いてください。
- ・柔らかく傷つきやすいため、たわし等でこすらないでください。また、クレンザーでの研磨もしないでください。傷がつく場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

名称：株式会社 能作

住所：富山県高岡市オフィスパーク 8-1

電話番号：0766-63-5080