


## サイズ選定について

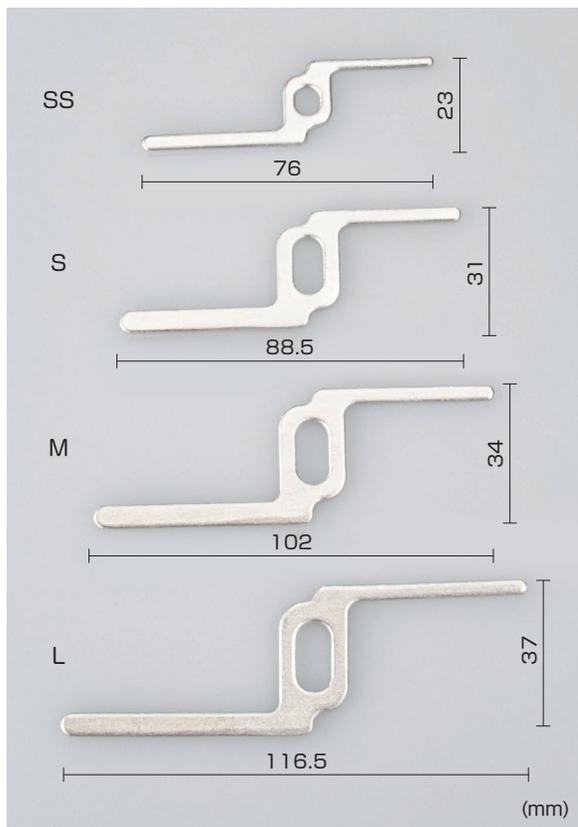

試着によるサイズ確認が難しい場合は、指の第二関節の周径をメジャーもしくはページ左の測定ツールを用いて測定し、サイズを選定してください。



測定ツール

以下を参考にサイズを選定してください。

### ■ ひとさし指、なか指、くすり指の場合

周径	~54mm	55~60mm	61mm~
適応サイズ	S	M	L

### ■ こ指の場合

周径	~47mm	48~57mm	58mm~
適応サイズ	SS	S	M

## ブシャール リング 使用上の注意事項

- 装着により少しずつ機能が劣化します。緩くなったら新しいリングに交換してください。使用頻度や使用方法により異なりますが、1~3ヶ月を目安に新しいリングを購入してください。
- なるべく長期間使用いただくために、リングの開閉は必要最低限にしてください。
- 本品は関節をある程度制動するものであり、関節を完全に固定したり、変形した関節を矯正したりすることはできません。
- 本品を装着しながら手を使用する作業等をした場合、リングが緩くなり外れやすくなることがあります。できるだけ手を安静にできる時にご使用ください。
- 骨折や腱の断裂などのケガに対して使用しないでください。また、指の第二関節(PIP関節)の固定以外の用途で使用しないでください。[症状がひどくなったり、ケガをしたりする可能性があります。]
- 本品を装着したままで磁気共鳴診断装置(MRI装置)を使用しないでください。[発熱しやけどする恐れがあります。]

[製造販売元] 株式会社 能作  
〒939-1119 富山県高岡市オフィスパーク 8-1  
TEL:0766-63-5080 FAX:0766-63-5510  
URL:www.nousaku.co.jp

製品についてのお問い合わせや、ご意見などございましたら、下記専用番号までご連絡ください。

能作メディカル事業課  
直通 TEL

**0766-73-8805**  
(平日9:00~17:00)

すず  
錫の曲がる特性を生かした  
固定リング

## ブシャール リング Bouchard ring

### 第二関節用

※第一関節の固定は「ヘバーデン リング」をご確認ください。



### [特徴]


指の第二関節に装着して固定することができます。関節の固定角度を自由に変えたり、指の太さや変形に合わせて適宜調整することが可能です。錫の「曲がる」という特性を生かした製品です。

医療機器届出番号  
16B3X10006000005

能作

N'OU.S.A.K.U

## ブシャーリング

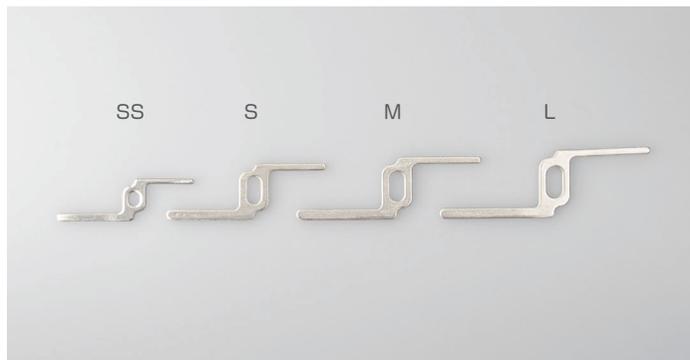


SS、S、M、Lの4サイズございます。

指の太さ、変形状態に応じてサイズを選定し、指の第二関節（PIP関節）に装着します。

**サイズ選定については、裏面をご確認ください。**

## 使用方法について

[各部の名称]

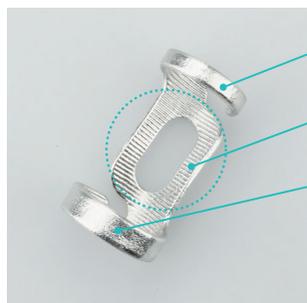


固定部（遠位側）

板部


固定部（近位側）

※製品は曲げた状態で販売いたします。

**1** 板部を曲げ、固定角度を調整します。

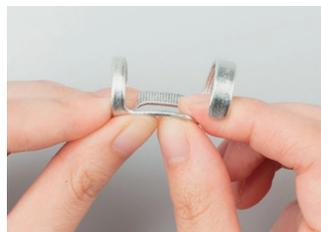

**2** 指を挿入するため上下の固定部を少し開きます。

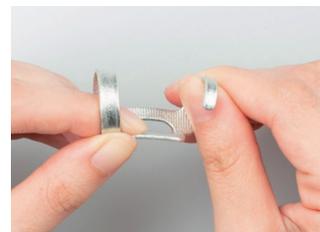

**3** 固定部（遠位側）を上にして、リングを装着対象の指に向かって挿入します。



**4** 指の第二関節がリングの中間になるように装着します。



**5** リングの固定部を閉じて、指の形に合うように調整します。必要に応じて板部の角度を再調整します。



## ブシャーリング用 スティック

リングと一緒にご購入をおすすめします。




スティックは、各サイズ毎にご用意しております。

2本セットで販売しております。

## 使用方法

**1** ご使用いただく中で、リングに徐々にクセがつき、丸い形から変形することがございます。スティックにリングを巻き付けて形を整えていただくと、ある程度元の丸い形に戻すことができます。

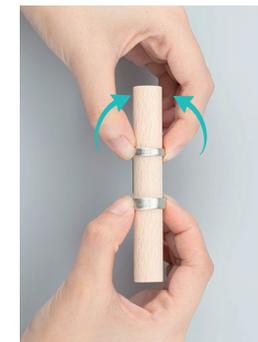

**2** 板部が硬く手の力で曲げにくい場合に、スティックを2本使用することで簡単に曲げることができます。



※「ブシャーリング用 スティック」のみのご注文は承っておりません。「ブシャーリング」購入時に一緒にお申し込みください。